

## INFORMACJA O WYWOŁANIU SYGNAŁU SOS DLA OPASKI MOBILNEJ MODEL S3

Dla prawidłowego działania funkcji wywołania sygnału SOS i informacji o upadku konieczne jest zdefiniowanie numeru/numerów opiekuna/opiekunów osoby noszącej opaskę. Przypisanie numerów telefonów opiekunów do opaski możliwe jest poprzez Panel zarządzania usługami społecznym w systemie „Dobre Wsparcie – moduł Dobra Opieka” przez zarządzającego Panelem.

1. Aby uruchomić opaskę należy wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk uruchamiania znajdujący się z boku opaski po prawej stronie.
2. Wywołanie SOS uruchamiane jest poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez około 3 do 5 sekund przycisku SOS.
3. W przypadku uruchomienia funkcji przez przypadek, można zakończyć połączenie poprzez wciśnięcie przycisku zakończenia połączenia wyświetlonego na panelu dotykowym opaski.
4. Po wciśnięciu przycisku SOS nawiązywane jest automatycznie połączenie z pierwszym ze zdefiniowanych numerów opiekunów. Pozostali opiekunowie otrzymują powiadomienie sms sygnalizujące zgłoszoną potrzebę pomocy wraz z godziną i datą.
5. W przypadku, gdy połączenie z pierwszym zdefiniowanym numerem nie zostanie nawiązane, opaska nawiązuje automatycznie połączenie z kolejnym zdefiniowanym numerem.
6. Opaska umożliwia odbieranie połączeń i prowadzenie rozmowy.

**W uwagi na wysoką czułość opaski na upadek, uderzenie, nie zalecamy korzystania z funkcji powiadamiania o upadku**